

danumed® Gastrostomi butonu için uzatma seti

kasyon

veya mideye ilaçların verilmesi ve /veya basıncı azaltılmak için kullanılır. Sadece düşük profil gastrostomi butonunun (n) takılı olduğu hastalara kullanılabilir. Buton ve besleme tüpü ya da enteral siringanın bağlanmasına yarar.

Buton besleme seti sadece bir hasta için kullanılabilir (tek kişi ürünü) ve maksimum 14 gün sonra değiştirilmelidir.

Kullanım

Enteral tüple hortumu setinin buton konnektörü sadece. Şekil 1'de

erilen bey

Satma hortumu setinin uyumluluğu

İkinci beyaz bağlantı halkası

Resim 1



İgürasyonlar
İnterl uzatma hortumu seti ve steril olmayan model k, 05 cm, 30cm ya da 60cm µm uzunluklarıyla ve aşağıdaki igürasyonlarda satın alınabilir:

 ENFit® konektörüne (dişi) sahip besleme setine bağlamak için ENFit® konektörü (erkek).	normal lümen hortum	büyük lümen hortum
 Y-ENFit® ENFit®	normal lümen hortum	-
 ENFit® konektörüne (dişi) sahip besleme setine bağlamak için Y-ENFit® konektörü (bk); besleme hattını kesmeden nir vına ek besinlerin verilmesi için.	-	büyük lümen hortum

Balon ve uzatma hortumu seti

The diagram illustrates the components and assembly of a balloon pump and extension hose set. The components are labeled as follows:

- Buton konnektörü (Button connector)
- İşaret çıkıntısı (Indicator protrusion)
- besin girişi (Feeding inlet)
- işaret çizgisi (Indicator line)
- balon inflasyon (Balloon inflation)
- yaz bağlantı halkası (Writing connection ring)

The diagram shows the button connector being inserted into the feeding inlet of the balloon pump. The indicator protrusion and indicator line are also shown. The writing connection ring is used to connect the balloon pump to the extension hose.

[illegible]

kuşlukları) 3-5 ml su vererek temizleyiz. Kolay bir akışa katkı ediniz.

teral uzatma hortumu setini çıkartınız. Bunun için, buton konnektöründe işaret kırmızı ile butondaki işaret çizgisi üzerine kadar buton konnektörünü dikkatlice saat yönüne çeviriniz. Ardından buton konnektörünü dikkatlice tondan çekerek çıkartınız.

tonun besleme deliğini tekrar tıpayla kapatınız.

teral uzatma hortumu setini yerli yer kullanıldının sonra ilk suyla çekin. Özellikle konnektörlerde bulunan ve zor temizlenen besin kalıntıları gerektiginde yumuşak bir fırçayla temizleyiniz. Havada kurumasına bırakınız.

ama: Ürünlerle bağlantıları olarak meydana gelen tüm ağır bir üretilmeye ve kullanılmıya ve/veya hastanın ikamet ettiği

İçilen yenitkili resmi kurumuna bildirilmelidir.

İler kullanırken herhangi bir belirsizlik, sorun veya kompliyon ortaya çıkarsa, bir doktor veya sağık uzmanı ile iletişime medir.

ama

İler orijinal ambalajlarında oda sıcaklığında ve kuru bir nda saklanmalıdır.

İler ırdan güneş ışıını ve ısı ışıınlan önlenmelidir.